



DR. WEIGERT

Systematic Hygiene

Таблица дозировок **neodisher® Septo Active**



Требуемая концентрация рабочего раствора

0.25%

0.5%

1.0%

2.0%

Требуемое количество порошка (шкала дозирующего колпачка **neodisher**)

Объем раствора	0.25%	0.5%	1.0%	2.0%
3 л	10 мл	20.0 мл	40 мл	75 мл
5 л	13 мл	26.0 мл	58 мл	125 мл
10 л	32 мл	63.0 мл	125 мл	250 мл
30 л	94 мл	188.0 мл	375 мл	750 мл

➤ Подготовьте требуемый объем питьевой воды (вода должна иметь t° 20-24° C)

➤ Добавьте порошок, перемешайте до полного растворения, при приготовлении не подогревать

➤ Через 15 минут рабочий раствор готов к использованию



Эксклюзивный представитель в России и СНГ DWS Group LLC

Офис г. Москва:
109044 г. Москва
Крутицкая набережная 1
тел.: +7 (495) 771-75-37

Офис г. Краснодар:
350015 г. Краснодар
ул. Путевая 1, офис 709
тел.: +7 (861) 298-05-41

Офис г. Санкт-Петербург:
197183 г. Санкт-Петербург
Липовая аллея 9, лит "А", офис 1005
тел.: +7 (812) 622-19-20

Офис в Казахстане:
050050 г. Алматы
Проспект Райымбека 169
тел.: +7 (727) 391-25-00

www.dws-g.com
E-mail: info@dws-g.com

Если у Вас возникнет проблема, Вы можете обратиться к нам для ее решения или воспользоваться сервисом на наших интернет-сайтах





DR. WEIGERT

Systematic Hygiene

Таблица дозировок neodisher® Septo Active



Требуемая концентрация рабочего раствора

0.5%

1.0%

2.0%

Требуемое количество порошка

Объем раствора	0.5%	1.0%	2.0%
5 л	—	—	100 г = 1 пакетик
10 л	—	100 г = 1 пакетик	200 г = 2 пакетика
20 л	100 г = 1 пакетик	200 г = 2 пакетика	400 г = 4 пакетика
30 л	—	300 г = 3 пакетика	600 г = 6 пакетиков

- Подготовьте требуемый объем питьевой воды (вода должна иметь t° 20-24° C)
- Добавьте порошок, перемешайте до полного растворения, при приготовлении не подогревать
- Через 15 минут рабочий раствор готов к использованию



Эксклюзивный представитель в России и СНГ DWS Group LLC

Офис г. Москва:
109044 г. Москва
Крутицкая набережная 1
тел.: +7 (495) 771-75-37

Офис г. Краснодар:
350015 г. Краснодар
ул. Путьевая 1, офис 709
тел.: +7 (861) 298-05-41

Офис г. Санкт-Петербург:
197183 г. Санкт-Петербург
Липовая аллея 9, лит "А", офис 1005
тел.: +7 (812) 622-19-20

Офис в Казахстане:
050050 г. Алматы
Проспект Райымбека 169
тел.: +7 (727) 391-25-00

www.dws-g.com
E-mail: info@dws-g.com

Если у Вас возникнет проблема, Вы можете обратиться к нам для ее решения или воспользоваться сервисом на наших интернет-сайтах

